



MOHAP/O/18/003959

التاريخ: ١٤٤١/١١/٢٠

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة
تحية طبية وبعد،
المحترمين
المحترمين

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية
3M Surgical Clipper Professional 9681
للشركة المصنعة 3M Gulf Ltd.

انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك لما فيه صحة الجميع، وبالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه نود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد قامت بإضافة تحذير على طريقة استخدام المنتج المذكور أعلاه، والذي يستخدم كوسيلة طبية لإزالة شعر الجسم من المرضى استعداداً للعمليات الجراحية.

حيث توصي الشركة المصنعة بوضع المنتج في شاحن الجهاز بعد الاستخدام حتى لا يؤدي الى تدهور بطارية ليثيوم أيون، ويتسبب في ارتفاع حرارة المنتج وحدوث حروق، أو التوقف عن العمل أثناء الاستخدام. علماً بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.

وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام الأجهزة المذكورة أعلاه يرجى التواصل على الأرقام التالية:
هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري
وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص
رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية



صدر بديوان عام الوزارة/دبي بتاريخ :
نسخة لـ:

- معالى / وزير الصحة ووقاية المجتمع
 - معالى / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
 - سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
 - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
 - سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
 - سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
 - سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي
 - سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
 - سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي
 - سعادة / مدير إدارة الدواء
- الموقر ..
..المحترم ..
..المحترم ..
..المحترم ..
..المحترم ..
..المحترم ..
..المحترم ..
..المحترم ..
..المحترم ..

مدير إدارة الدواء

١٦